

АО «МТЛ»

**Специализированное программное
обеспечение (СПО-РИС) для Радиологической
Информационной Системы «ИнтеГРИС-МТ»**

Руководство по установке



Оглавление

Глава 1:	Описание	3
Глава 2:	Характеристики программного обеспечения	3
Глава 3:	Требования к установке и эксплуатации	4
Глава 4:	Инструкция по установке	4
Глава 5:	Начало работы	4

Глава 1: Описание

Специализированное программное обеспечение (СПО-РИС) для Радиологической Информационной Системы «ИнтеГРИС-МТ» (далее - ПО) предназначено для автоматизации деятельности лечебного учреждения в области получения, хранения и обработки цифровых данных, передачи графической диагностической информации, а также ведения карты пациента с централизованным хранением заключений.

ПО поддерживает передачу диагностической информации, в том числе, по защищенным каналам связи региональных и глобальных вычислительных сетей.

ПО предназначено для доступа к данным сервера ЛПУ с персонального компьютера/ноутбука или планшета (с ОС Windows).

Область применения – медицина, предназначено для работы в медицинских учреждениях широкого профиля.

Глава 2: Характеристики программного обеспечения

ПО разделено на модули, выполняющие следующие функции:

- Модуль Администратор — регистрация пациента на обследование, планирование обследований;
- Модуль просмотра снимков — поиск снимков в архиве обследований, просмотр снимков в различных модальностях (общий рентген, cr-снимки, ангиография, МРТ, маммография, КТ, рентгеноскопия), измерение, просмотр заключений.

Глава 3: Требования к установке и эксплуатации

Для корректной работы ПО необходимо осуществлять доступ с персонального компьютера/ноутбука или планшета с использованием следующих браузеров:

- Internet Explorer, не ниже версии 10.
- Mozilla Firefox, не ниже версии 24.0.
- Google Chrome, не ниже версии 30.0.1599.101.

Системные требования к серверу:

- системный блок:
 - частота процессора, не ниже 1,8 ГГц;
 - оперативная память, не менее 4 Гб;
 - жесткий диск, не менее 120 Гб;
- монитор с диагональю не менее 17”;
- клавиатура;
- мышь;
- операционная система - Microsoft Windows 7 или более поздняя версия.

Глава 4: Инструкция по установке

Установка и настройка ПО производится техническими специалистами АО «МТЛ».

Глава 5: Начало работы

1. На рабочем столе выбрать ярлык СПО-РИС.
2. В поле «логин» ввести user.
3. В поле «пароль» ввести 123.